


使用説明書



English

PCR検査 唾液採取キット セット内容

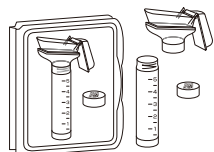

A 唾液採取キット


唾液採取管+
不活化保存液入りキャップ+
QRコード付き蓋



B チック付き 透明袋コットン入り




C パウチ袋

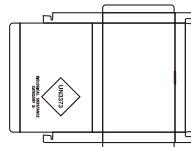

D 組み立て箱



E 返送用 レターパック

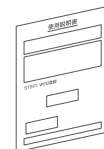

F 使用説明書 (本紙)


ご利用の流れ

Step.1 WEB登録




Webサイトに
ログインして、
情報登録する

Step.2 検体採取

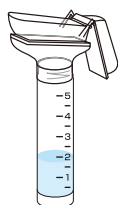

唾液検体を
採取します

Step.3 返送

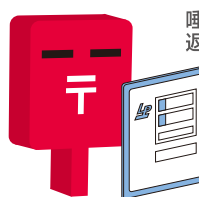

唾液検体を
返送します

Step.4 結果確認



検査完了の
お知らせ後、
Web上で結果を
確認します



注意事項

※次のWeb登録を完了せずに検体を返送すると検査結果の通知
ができませんので、お気をつけください。

※唾液採取前30分程度は飲食・歯磨き・うがい薬を使用したうが
いはしないでください。

Step.1 WEB登録

1 検体番号を書き写す

検体番号

□	□	□	□	-	□	□	□	□	-	□	□	□	□	-	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



2 Webサイトにログインして、登録する

WebサイトにアクセスしてIDとパスワードでログインします。質問項目に従って情報を入力してください。このお
手続きがお済みでない、検査結果が通知できませんので、お気をつけください。また、IDとパスワードは結果通
知に使用されるため、本使用説明書ごと厳重に保管ください。情報の入力完了後、唾液検体を採取してください。

ID

パスワード

WebサイトURL


<https://pcr.fmedeqp.com/login>



裏面の「Step.2」へ続く→

Step.2 検体採取

1 氏名を記入する

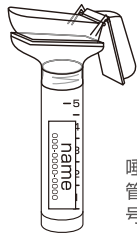


唾液を採取する前に、採取管の側面に「氏名・電話番号」を記入します。

2 唾液を採取する




採取キットを口に添え、唾液を採取してください。唾液が出るまで5～10分ほどかかる場合がございます。また、痰や口に残っている食べ物が混入しないようご注意ください。

3 唾液の量の確認

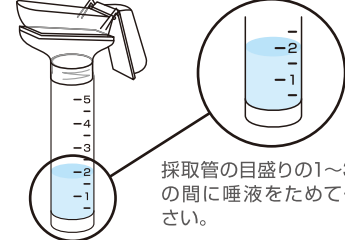


採取管の目盛りの1～3mlの間に唾液をためてください。

4 不活化保存液を入れる

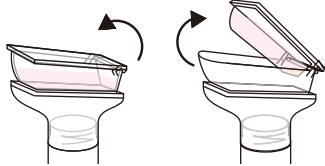


キャップを閉じると中のフィルムが破れて保存液が出てきます。保存液が出にくい場合は、図のようにキャップを少しあげると出やすくなります。

5 キャップを外す

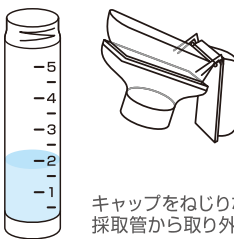

キャップをねじりながらゆっくり採取管から取り外してください。

6 蓋を締める・不活化保存液と唾液を混ぜる

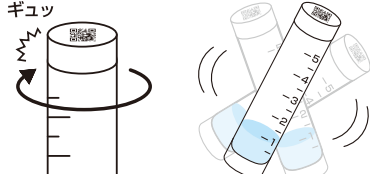

QRコードの付いた蓋でしっかりときつく締めてください。そのあと、不活化保存液と唾液を混ぜてください。


Step.3 返送

1 検体を袋に入れる




Bのコットン入りの透明袋に唾液の入った採取管を入れチャックします。次にCのパウチ袋に入れてチャックします。

2 Dの箱を組み立てる

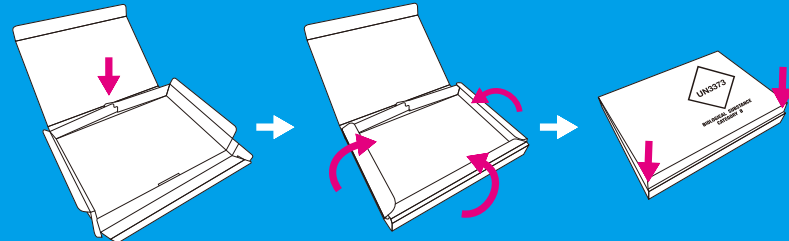


3 検体を箱に入れる

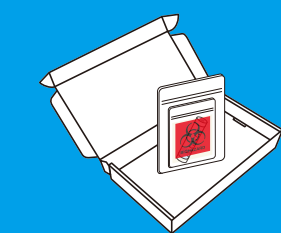


4 返送用レターパックに入れる

最後にEの返送用レターパックに入れて、封をします。

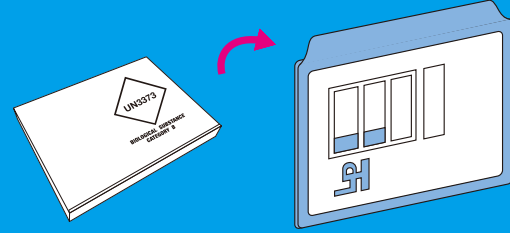

5 返送

Eの返送用レターパックの「Fromご依頼主」欄に電話番号まですべて記入してください。シール(ご依頼主様用保管シール)を剥がして、右枠に貼り付けてください。お近くの郵便ポストや郵便局に出してください。

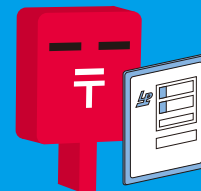

Step.4 結果確認

「Step.1」でご登録いただいたメールアドレスに検査完了のお知らせをいたします。検査結果は「Step.1」で登録したWebサイト (<https://pcr.fmedeqp.com/login>) からIDとパスワードでログインして確認ができます。



※この用紙は検査結果が判明するまで、お手元に大切に保管してください